



Sicherheits- und Reinigungshinweise zur LIINI® Milchpumpe

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass du dich für unsere Brust- bzw. Milchpumpe entschieden hast. Wir legen grossen Wert auf deine Sicherheit und das Wohlergehen deiner Familie.

Um sicherzustellen, dass du dein Gerät sicher nutzen kannst, ist es wichtig, die nachfolgenden Sicherheits- und Reinigungsanweisungen sorgfältig zu befolgen. Unsachgemässe Handhabung kann ernsthafte Risiken mit sich bringen!

Handbuch / Bedienungsanleitung

Wir verzichten bewusst auf gedruckte Bedienungsanleitungen und sparen dadurch jedes Jahr mehrere Tonnen Papier ein. Gleichzeitig können wir unsere elektronische Bedienungsanleitung jederzeit aktualisieren, damit du stets die neueste Version zur Hand hast.

Auch wenn man vieles intuitiv bedienen kann: Nimm dir bitte kurz **5 Minuten** Zeit und **lies die Anleitung durch**. Die Anwendung gemäss Bedienungsanleitung ist wichtig, damit du lange Freude am Produkt hast, alles sicher funktioniert – und unnötiger Ärger vermieden wird.

Du findest die **Bedienungsanleitung** über den nachfolgenden **QR-Code** (mit dem Smartphone scannen):



Online verfügbar: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Allgemeine Angaben

Hersteller	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Schweiz
Kontakt	compliance@liini.ch
Ursprungsland	China (CN)
Zertifizierungen	CE, RoHS
EU-Bevollmächtigter	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede The Netherlands (authorities only)
WEEE-Registrierungsnummer (DE)	74241330 stiftung elektro-altgeräte register Nordostpark 72 90411 Nürnberg
WEEE-Registrierungsnummer (AT)	9008392342860 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Wien
WEEE-Registrierungsnummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-Registrierungsnummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Allgemeine Sicherheitshinweise (GPSR)

Unsachgemässes Tragen deines Babys kann zu schweren Unfällen und Verletzungen führen und birgt **ernsthafte Sicherheitsrisiken**.

Bitte beachte die folgenden Hinweise unbedingt:

- Verwende die LIINI® Milchpumpe ausschließlich gemäß dieser Anleitung.
- Das Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck – das Abpumpen von Muttermilch – bestimmt.
- Die Milchpumpe ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet oder gereinigt werden.
- Überprüfe vor jeder Nutzung alle Komponenten auf Beschädigungen. Verwende das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt, verformt oder nicht korrekt montiert sind.
- Verwende ausschließlich die mitgelieferten oder von LIINI® vorgesehenen Komponenten und Aufsätze.
- Beende die Nutzung sofort, wenn Schmerzen, Unwohlsein oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten.

Hinweise zur Anwendung

- Stelle sicher, dass die Milchpumpe korrekt zusammengesetzt ist, bevor du sie in Betrieb nimmst.
- Wähle stets eine für dich angenehme Intensitätsstufe. Zu hohe Saugstärken können unangenehm sein.
- Die Milchpumpe darf nicht während des Schlafens verwendet werden.
- Verwende das Gerät nicht beim Autofahren oder bei Tätigkeiten, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Die Milchpumpe ist nicht wasserdicht. Halte die elektrische Einheit von Wasser und Feuchtigkeit fern.

Akku- und Ladehinweise

- Lade die Milchpumpe ausschließlich über den vorgesehenen **USB-C-Anschluss**.
- Verwende nur geeignete Netzadapter mit entsprechender Ausgangsleistung.
- Lade das Gerät nicht unbeaufsichtigt und nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwende die Milchpumpe nicht während des Ladevorgangs.
- Setze den Akku keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer aus.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lütlikofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Reinigungsanweisungen

- Reinige alle Teile, die mit Muttermilch in Kontakt kommen, vor dem ersten Gebrauch sowie nach jeder Nutzung.
- Zerlege die Milchpumpe vollständig vor der Reinigung.
- Milchkontaktteile (z. B. Silikonkissen, Ventile, Muttermilchbehälter) können mit warmem Wasser und mildem Spülmittel gereinigt, abgekocht oder mit anderen Babyutensilien sterilisiert werden (gemäß üblicher Empfehlungen).
- Die elektrische Einheit darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Reinige diese ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Lasse alle Komponenten nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor du sie wieder zusammensetzt oder verstaust.

Aufbewahrung

- Bewahre die Milchpumpe an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Lagere das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setze das Produkt keiner dauerhaften Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Informationen zur WEEE-Richtlinie 2012/19/EU

Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols



Alle unsere Elektronikgeräte (Flaschenwärmer, Breiwärmer, Einschlafhilfen) sind mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass **du gesetzlich verpflichtet bist**, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen, d.h. Altgeräte sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nicht fest verbaute Batterien oder Akkus müssen vorher entnommen und getrennt entsorgt werden.

Bei unseren Produkten sind alle Akkus fest verbaut – du kannst also die Produkte **als Ganzes entsorgen**.

Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist.

Personenbezogene Daten (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU)

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten werden darauf hingewiesen, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Informationen zur Batterie-Richtlinie 2006/66/EG

Nachfolgend sind, wenn immer Bezug auf Batterien oder Akkumulatoren genommen wird, Geräte-Alt Batterien oder -Altakkumulatoren gemeint.

Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass du gesetzlich verpflichtet bist, Batterien oder Akkumulatoren einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen, d.h. dass diese getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, sind diese mit den chemischen Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb) gekennzeichnet, bei denen der Grenzwert überschritten wird.

Möglichkeiten der Rückgabe von Batterien oder Akkumulatoren (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Besitzer von Batterien bzw. Akkumulatoren können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Batterien bzw. Akkumulatoren oder direkt im Handel kostenlos nach Gebrauch abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist

Abfallvermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Vermeidung von Vermüllung (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Reduziere die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem du Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkumulatoren einsetzt. Lasse Batterien oder batteriebetriebene Elektro- und Elektronikgeräte nicht einfach liegen und vermeide somit die Vermüllung der Umwelt – zum Schutz unserer Kinder.

Möglichkeiten der Vorbereitung zur Wiederverwendung von Altbatterien (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Prüfe die Möglichkeit der Wiederverwertung von Altbatterien.

Mögliche Auswirkungen der in Batterien enthaltenen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Batterien bzw. Akkumulatoren können Stoffe enthalten, die mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie auf die Umwelt haben. Insbesondere ist mit lithiumhaltigen Batterien aufgrund der besonderen Risiken, wie z.B. Brandgefahr oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen, vorsichtig umzugehen.

Bedeutung der getrennten Sammlung und der Verwertung (Batterie-Richtlinie 2006/66/EG)

Die getrennte Sammlung und der Verwertung von Batterien bzw. Akkumulatoren leisten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7